

# Nesterilní rouška pro civilní použití

## WORKSHOP BFE95CP



### SPECIFIKACE

<b>POPIS</b>	Jednorázová obličejová rouška pro veřejnost CWA 17553:2020 <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 vrstvá přiléhavého anatomického tvaru (non-medical) s filtrační účinností BFE&gt;95%</li><li>• určeno pro dospělého</li><li>• v souladu s normou CWA 17553:2020, BFE testována dle ČSN EN 14683:2019+AC</li></ul>
<b>BALENÍ</b>	50 ks v krabici, 2000 ks v kartonu
<b>ZÁRUČNÍ DOBA</b>	2 roky
<b>SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA</b>	Skladujte na místě chráněném před světlem, větraném a suchém místě při teplotě do 30°C. Tato maska slouží na jedno použití.
<b>BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY</b>	Pro správné používání obličejové roušky pro veřejnost (dále jen „rouška“) je důležité, abyste dodržovali tyto pokyny: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jste-li nemocní, rouška je nevhodná. Poradte se se svým lékařem.</li><li>• Tato rouška není zdravotnický prostředek ve smyslu směrnice 93/42/EHS nebo nařízení EU/2017/745 (chirurgické roušky) ani osobní ochranný prostředek ve smyslu nařízení EU/2016/425 (ochranné prostředky dýchacích orgánů).</li><li>• Vždy zkontrolujte, zda vám rouška správně padne a zda zakrývá váš nos, ústa a bradu. Doporučuje se, aby tato rouška byla nošena na holé pokožce; vousy mohou snížit účinnost filtrace pod uvedené limity.</li><li>• Roušky nejsou vhodné pro děti do 3 let. Doporučuje se, aby děti mezi 3 až 12 lety byly během nošení roušky pod dohledem. Rouška, která ztěžuje uživateli při prvním nasazení dýchání, se považuje za nevhodnou. Může vyžadovat určitý čas, než se s rouškou budete cítit pohodlně.</li><li>• Tato rouška nenahrazuje ochranná opatření (pravidelné mytí rukou, fyzický rozestup, snížený kontakt s jinými lidmi). Minimalizuje průchod kapének slin při dýchání uživatele do okolního prostředí.</li><li>• Nepoužívejte, prováděte-li namáhavou fyzickou aktivitu.</li><li>• Přestaňte tento výrobek používat při prvních známkách poškození.</li><li>• Po použití zlikvidujte</li></ul>
<b>VAROVÁNÍ</b>	Je přísně zakázáno masku používat při zasažení plísni, poškození obalu nebo po uplynutí doby použitelnosti. Tento produkt je nesterilní. Před použitím by měl být sterilizován EO. Je to jednorázový produkt, nelze jej použít opakovaně. Pokud uživatel cítí větší odpor při dýchání nebo je maska znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji. Tento jednorázový produkt není možné prát ani čistit.
<b>POUŽITÍ A ÚDRŽBA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Před použitím zkontrolujte zda není rouška poškozená a zda vám správně padne a zda zakrývá váš nos, ústa a bradu.</li><li>2. Vytvořte nosní můstek na horní straně.</li><li>3. Nasadte pásky na uši.</li><li>4. Upravte měkkou sponu ta, aby seděla na nose.</li><li>5. Zkontrolujte, zda můžete dobře dýchat a pokud je to nutné proveďte úpravu.</li></ol>

