

BFE 98 Type II R Jednorázová ústenka 3-vrstvá, nesterilní



SPECIFIKACE

POPIS	Nesterilní produkt typu IIR dle EN 14683 + AC Vyrobeno ze dvou vrstev netkané textilie a jedné filtrační vrstvy s účinností BFE > 98%, skládáním, lisováním za tepla, nařezáním a bodovým svařováním elastického pásu. Jedná se o typ roušky s ušními smyčkou.
VELIKOST	Unisex
POKYNY K POUŽITÍ	Zkontrolujte, zda je obal v dobrém stavu, otevřete jej přímo před použitím. Před nasazením ústenky si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou po dobu 20s. Ústenkou si zakryjte nos a ústa. Ústenku upevněte pomocí elastických šňůrek kolem uší a nosní modelační pásek si přizpůsobte na nos tak, aby maska doléhala na tváři. WHO doporučuje vyměnit roušku za novou, jakmile je vlhká. Ústenku sundávejte ze zadu, ihned vyhoďte do uzavřeného koše, a pak si očistěte ruce dezinfekcí nebo mýdlem s vodou.
UPOZORNĚNÍ	Je přísně zakázáno roušku používat při zasažení plísní, poškození obalu nebo po uplynutí doby použitelnosti. Tento produkt je nesterilní. Před použitím by měl být sterilizován EO. Je to jednorázový produkt, nelze jej použít opakovaně. Pokud uživatel cítí větší odpor při dýchání nebo je rouška znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji. Tento jednorázový produkt není možné prát ani čistit.
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	Skladujte v suchém a větraném prostředí bez agresivních plynů. Chraňte před ohněm a hořlavinami. Během přepravy by měl být produkt chráněn před vlhkostí a utěsněn.
BALENÍ	50ks / krabička
DOBA ŽIVOTNOSTI	3 roky
ČÍSLO ŠARŽE	viz obal
DATUM VÝROBY	viz obal
DATUM UKONČENÍ DOBY POUŽITELNOSTI	viz obal

