

BFE98

Nesterilní zdravotnická maska Workshop



SPECIFIKACE

POPIS	Vyrobeno z 5-ti vrstev netkané textilie. 3D skládací maska se zalisovanými okraji a nosním můstkem. Prostřední filtrační vrstva s minimální účinností BFE \geq 98 % Nesterilní produkt typu IIR dle EN 14683:2019+AC Velikost: Unisex
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN	Standard shody EN 14683:2019+AC:2019 Type IIR
BALENÍ	50ks / krabička, 1 ks/sáček
ZÁRUČNÍ DOBA	2 roky
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	Skladujte v suchém a větraném prostředí bez agresivních plynů. Chraňte před ohněm a hořlavinami. Během přepravy by měl být produkt chráněn před vlhkostí a utěsněn.
LIKVIDACE	S běžným domovním odpadem
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY	Nesmí se čistit ani prát. Určeno pro všeobecné i profesionální použití (civilní i zdravotní sektor). Určeno pro dospělého. Nevhodné pro děti do 3 let. Děti mezi 3 až 12 lety by měly být při nošení pod dohledem. Před použitím zkontrolujte, zda není ochranná maska poškozená a zda vám správně padne a zda zakrývá váš nos, ústa a bradu. Doporučuje se nosit masku na holé pokožce, vousy mohou snížit účinnost filtrace.
VAROVÁNÍ	Je přísně zakázáno masku používat při zasažení plísní, poškození obalu nebo po uplynutí doby použitelnosti. Tento produkt je nesterilní. Před použitím by měl být sterilizován EO. Je to jednorázový produkt, nelze jej použít opakovaně. Pokud uživatel cítí větší odpor při dýchání nebo je maska znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji. Tento jednorázový produkt není možné prát ani čistit.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA	Zkontrolujte, zda je obal v dobrém stavu, otevřete jej přímo před použitím. Před nasazením masky si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou po dobu 20s. Maskou si zakryjte nos a ústa, upevněte pomocí elastických šňůrek kolem hlavy. Nosním drátkem uživatel vytvaruje horní část masky u kořene nosu dle potřeby. Doba použití 2h nebo do momentu zvlhnutí. Masku sundávejte zezadu, ihned vyhodte do uzavřeného koše, a pak si očistěte ruce dezinfekcí nebo mýdlem s vodou.

