

# FFP2 Filtrační polomaska skládaná bez ventilku - dětská CARE 0961K



## SPECIFIKACE

<b>POPIS</b>	Dětská jednorázová filtrační polomaska s filtrační třídou FFP2 CARE 0961K, skládaná, nesterilní. V barevném provedení modrá a růžová. Filtrační účinnost nejméně 94%. <ul style="list-style-type: none"><li>• vysoce prodyšný</li><li>• dobře kopíruje tvar dětského obličeje</li><li>• třída ochrany FFP2</li><li>• nízká hmotnost</li><li>• pohodlná flexibilní gumička pro snadné nošení</li><li>• vícevrstvý design</li><li>• vhodná pro děti od 4 do 11 let</li></ul>
<b>NORMA</b>	EN 149:2001 + A1:2009
<b>NOTIFIKOVANÝ ORGÁN</b>	CE1463
<b>BALENÍ</b>	1 ks v sáčku, 25 ks v krabici, 1000 ks v kartonu
<b>ZÁRUČNÍ DOBA</b>	2 roky
<b>SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA</b>	Skladujte v suchém a větraném prostředí bez agresivních plynů. Chraňte před ohněm a hořavinami. Během přepravy by měl být produkt chráněn před vlhkostí a utěsněn.
<b>LIKVIDACE</b>	S běžným domovním odpadem
<b>BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY</b>	Je přísně zakázáno masku používat při zasažení plísní, poškození obalu nebo po uplynutí doby použitelnosti. Tento produkt je nesterilní. Je to jednorázový produkt, nelze jej použít opakovaně. Pokud uživatel cítí větší odpor při dýchání nebo je rouška znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji. Tento jednorázový produkt není možné prát ani čistit.
<b>VAROVÁNÍ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tato maska označená „NR“ je určena pouze pro jedno použití.</li><li>2. Tato maska pomáhá chránit před určitými znečišťujícími látkami ve formě částic, ale zcela nevylučuje vystavení se riziku nákazy nebo infekce.</li><li>3. Nepoužívejte na bradku nebo jinak upravené vousy nebo za jiných podmínek, které brání dobrému utěsnění mezi obličejem a těsnící plochou respirátoru.</li><li>4. Tento výrobek nedodává kyslík. Používejte pouze v přiměřeně větraných prostorách obsahujících dostatek kyslíku pro podporu života.</li><li>5. Nepoužívejte, jsou-li koncentrace kontaminujících látek bezprostředně nebezpečné pro zdraví nebo život.</li><li>6. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí.</li><li>7. Pokud je dýchání obtížné nebo se maska poškodí či zdeformuje, okamžitě ji vyměňte.</li></ol>
<b>POUŽITÍ A ÚDRŽBA</b>	Zkontrolujte, zda je obal v dobrém stavu, otevřete jej přímo před použitím. Před nasazením polomasky si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou po dobu 20s. Zakryjte si nos a ústa. Masku upevněte pomocí elastických šňůrek kolem uší a nosní modelační sponu si přizpůsobte na nos tak, aby maska doléhala na tváři. WHO doporučuje vyměnit roušku za novou, jakmile je vlhká. Masku sundávejte zezadu, ihned vyhod'te do uzavřeného koše, a pak si očistěte ruce dezinfekcí nebo mýdlem s vodou.

